



BEMER Horse Set

- Die physikalische Gefäßtherapie mit dem BEMER Horse Set verbessert nachweislich die Gesundheit und das Wohlbefinden des Pferdes.
- Das BEMER Horse Set verbessert die Mikrozirkulation, also die Durchblutung der kleinsten Blutgefäße, fördert den Stoffwechsel, sowie die Zellaktivität und damit Erholungs- und Genesungsprozesse von Pferden.
- Decke und Gamaschen enthalten mit Kunststoff isolierte Kupferspulen, die per Knopfdruck ein elektromagnetisches Feld erzeugen. Das wiederum übermittelt ein elektrisches Signal im Pferdekörper. Das Magnetfeld selbst ist nur Transportmittel.
- Im Pferdekörper angekommen stimuliert das Signal die dem Kapillargebiet vorgeschalteten Arteriolen. Sie sind für den Transport von Sauerstoff, Nährstoffen und Hormonen zuständig. Den Transport treiben sie mittels Pumpbewegungen voran.

Anwendung

- Bitte immer eine eigene, saubere Abschwitzdecke vor Gebrauch unter die BEMER Decke legen!!!!
- Bei der ersten Anwendung immer mit der niedrigsten Stufe (P1/5min) beginnen.
- Das BEMER Horse Set bei der ersten Anwendung ohne Gamaschen verwenden.
- Lasse dein Pferd nie alleine mit der BEMER Decke!
- Beobachte dein Pferd, bei Unbehagen Behandlung abbrechen!
- Nach Gebrauch das BEMER Horse Set wieder sauber und sorgfältig in die Tasche geben!
- Das BEMER Horse Set vollständig geladen und termingerecht zurückbringen!

Es ist eine Frage des Anstandes, geborgte Sachen mindestens so gut zurückzugeben, wie man sie erhalten hat!

Bei Fragen steht euch gerne Alexandra Trudenberger unter 0676/6169853 zur Verfügung.

Gutes Gelingen wünscht das gesamte Vorstands-Team!